

El arnés de postura se utiliza para :



- Transportar en toda seguridad las personas con necesidades especiales, tales como trastorno del espectro Autista, Asperger, personas con comportamiento difícil o desafiante.
- Proporcionar un apoyo postural a las personas con discapacidad física o falta de control muscular durante el transporte.

La vida útil se estima a 10 años con un uso diario.



CARACTERÍSTICAS

- Nuevo diseño ergonómico con respaldo ajustable
- Nuevo sistema de evacuación de emergencia, accesible detrás del asiento o por el maletero
- Fabricado en Francia en material de neopreno
- Adaptable y duradero : se puede usar con un asiento elevado y tiene cinturones ajustables para adaptarse al niño en crecimiento
- Universal : adaptable a la mayoría de asientos
- Seguro : siete hebillas bloqueables y un juego de llaves
- Fácil de transportar en coche, autobús

EN CASO DE EMERGENCIA !

**Sistema de evacuación rápida :
ESCAPE BOX disponible en
opción y recomendado**



**El arnés contiene un sistema de evacuación
rápida en caso de emergencia**



OPCIONES DE PRODUCTO



- Sistema de evacuación de emergencia - Escape Box



- Juego de 2 cinturones adicionales para instalación de asiento individual



- Reposacabezas regulable en altura con soporte frontal

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES A

- El uso del cinturón de seguridad es obligatorio mientras utiliza el arnés, ya que no reemplaza el cinturón de seguridad.
- Un martillo/corta cinturas está incluido con el arnés y debe estar disponible en el vehículo en caso de emergencia.
- Se recomienda utilizar el asiento elevador si el utilizador mide menos de 1m10. De lo contrario, el arnés y cinturón ocasionarán incomodidad en el cuello y el dispositivo perderá su eficacia.
- El arnés debe ser utilizado tal que indicado en la noticia de utilización.
- Aconsejamos de no lavar el arnés en lavadora porque puede deformarse y acelerar el gasto del producto. Recomendamos de utilizar una esponja húmeda, frotar y secar con una toalla seca.
- Desaconsejamos igualmente utilizarlo sin camiseta para evitar contacto directo con la piel, en caso de irritación.
- Es necesario de verificar regularmente el estado del arnés para que esté conforme a su uso y evitar cualquier incidente.
- Toda negligencia puede causar daños y la responsabilidad del buen funcionamiento que le puede causar al utilizador.
- Aconsejamos que el utilizador sea acompañado durante su viaje.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Base

A



Respaldo ajustable

B



Chaleco frontal

C



INSTALACIÓN EN ASIENTO DE BANCO

1. Separar la base (A+ B) del chaleco frontal de retención (C).
2. Coloque la base (A+B) sobre el respaldo del asiento. Si necesario, plegar el asiento hacia adelante para pasar las correas que van alrededor el asiento.
3. Acortar y apretar los cinturones al máximo para asegurarse que no flota.
4. Una vez que la persona esta sentada cómodamente, tomar el chaleco frontal de retención (C) y acortar contra la base (A + B). Ajustar las 7 correas y bloquear, si necesario.
5. Devuelva la parte inferior del cinturón como se muestra en la imagen.
6. Darle vuelta a las correas en su propia hebilla para evitar que se resballen.



INSTALACIÓN EN ASIENTO INDIVIDUAL

Los pasos de instalación son los mismos que para el asiento estándar.

2 cinturones adicionales son necesarios y disponibles en opción para el arnés.



Un cinturón adicional se fija detrás del asiento y ayuda a que la base (A+ B) rodea todo el asiento, no solo el respaldo





El segundo es para fijar entre el asiento y el respaldo. Tense el cinturón al máximo para que el arnés no flote.

FÁCIL EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA EN 1, 2 Y 3

1. Persona sentada con su arnés en el coche

2. Apretar los 2 botones PRESS al mismo tiempo detrás del asiento

3. La persona puede salir rapidamente del coche son su arnés. 3

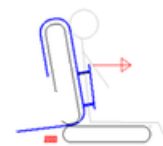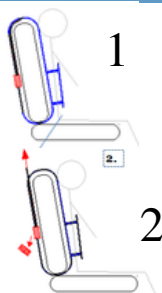

ACCESS ABILITY



Dirección : 10 bis rue du 11 novembre

80270 Airaines, Francia

tel: +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu; www.access-ability.eu



UDI Identificación Unica del Dispositivo



Fecha limite de utilización

MD Dispositivo Médico



Certificación Europea

LOT Número de Lote del fabricante

REF Referencia Catálogo



Fabricante