

SafeWinch

Système 2 en 1
Simplifiez votre vie!

Un nouveau système révolutionnaire qui améliorera la vie des utilisateurs de fauteuils roulants et de leurs accompagnateurs.

Il s'agit d'un système combiné de treuil et d'arrimage avant pour fauteuil roulant, composé de deux unités compactes, synchronisées et autobloquantes. Vous pourrez facilement transférer et sécuriser un fauteuil roulant dans un véhicule grâce à une simple télécommande.

CRÉÉ ET BREVETÉ par



UTILISATION FACILE - COMPACT - SANS EFFORT - VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Deux treuils indépendants, synchronisés automatiquement par une unité de commande centrale.

L'accompagnateur n'a qu'à attacher les sangles au fauteuil roulant et appuyer sur la touche IN de la télécommande pour monter le fauteuil et OUT pour le descendre;

SafeWinch est utilisé comme dispositif d'arrimage avant pour fauteuil roulant et a donc été testé conformément à la norme ISO 10542.



10 Bis rue du 11 novembre - 80270 Airaines - FRANCE - contact@access-ability.eu - +33 (0)3 22 25 58 65

www.access-ability.eu



SafeWinch

2 in one
to ease your life



Contenu du kit:

- 2 unités motorisées
- 1 unité centrale
- 1 panneau de commande
- Faisceaux électriques
- 1 grande télécommande
- 1 petite télécommande



Montée du fauteuil roulant:

1. Positionner le fauteuil au bas de la rampe.
2. Appuyer sur OUT pour dérouler les sangles et les fixer au fauteuil.
3. Appuyer sur IN pour enclencher la montée en accompagnant le mouvement.
4. Arrêter lorsque le fauteuil atteint presque sa position finale.
5. Fixer l'arrimage arrière manuellement.
6. Appuyer de nouveau sur IN pour tendre automatiquement les sangles.
7. Vérifier que la LED clignote deux fois consécutivement.
8. Boucler la ceinture de sécurité de l'occupant.
9. Fermer la porte arrière : le SafeWinch se verrouille automatiquement.



Descente du fauteuil roulant:

10. Appuyer sur OUT pendant quelques secondes pour détendre légèrement les sangles.
11. Retirer les crochets arrière du fauteuil roulant.
12. Poursuivre la descente en maintenant OUT, tout en accompagnant le fauteuil.

Appairage nouvelle télécommande:

Sangles arrimage arrière
en option

1. Ouvrir la trappe sur l'unité centrale de commande.
2. Appuyer sur le bouton de programmation situé sous la trappe.
3. Appuyer sur un bouton de la télécommande à appairer.
4. La télécommande est enregistrée et prête à l'emploi.



10 Bis rue du 11 novembre - 80270 Airaines - FRANCE - contact@access-ability.eu - +33 (0)3 22 25 58 65

www.access-ability.eu

