

Cabrestante fijo ACCESS WINCH

El cabrestante fijo Access Winch, compacto y potente, es un dispositivo que asiste mecánicamente a los acompañantes en silla de ruedas para salvar el obstáculo de la rampa de acceso a los vehículos adaptados.



Innovaciones:

- Tope de final de recorrido para correa completamente retraída: esto evita que la correa se enrolle en la dirección incorrecta si el usuario continúa presionando el botón "IN"
- Tope de final de recorrido para correa completamente extendida
- Componentes metálicos galvanizados con tratamiento superficial
- Mando a distancia con batería de larga duración
- Arranque y parada suaves
- Electrónica mejorada y velocidad ajustable en la fabricación
- Motor más potente y muy silencioso
- Correas y hebillas de mejor calidad



Características estándar:

- Fácil instalación en 12 V con placa de montaje incluida
- Potente: capacidad de carga de 250 kg
- Longitud de la correa de 5,5 m.
- Pequeño, para una buena integración en el vehículo.
- 2 años de garantía



Precauciones de empleo:

- No utilice el cabrestante mientras el vehículo esté en movimiento.
- El cabrestante no reemplaza el sistema de sujeción (fijación) de la silla de ruedas.
- Compruebe que la correa esté limpia, sin signos de desgaste y libre de obstáculos.
- El asistente debe guiar y empujar ligeramente la silla durante el ascenso y descenso.


Cabrestante Fijo Access Winch

accès véhicule • transfert fauteuil • adaptation conduite • transport pmr • harnais maintien • transfert pmr

10 Bis rue du 11 novembre • 80270 Airaines • HAUTS DE FRANCE • France
contact@access-ability.eu • 03 22 25 58 65

www.access-ability.eu

Diagrama de conexión eléctrica:

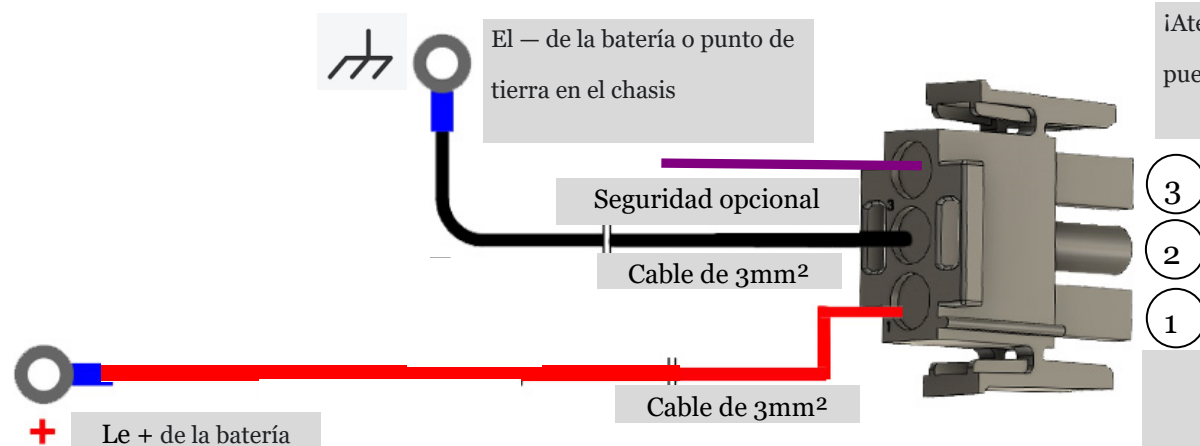

¡Atención! Un cableado incorrecto puede dañar el cabrestante.

Hilo morado

En caso de contacto con el suelo a través del freno de mano o de las puertas traseras, el cabrestante queda inmovilizado.

Si el cable no está conectado, la seguridad no se activa y el cabrestante funciona normalmente.

Hay 2 opciones de montaje del cabrestante:

1. Instalación con la placa suministrada (requiere tornillos M8)
2. Instalación sin placa suministrada, con un único punto de fijación (tornillo M10)

Condiciones de uso:

- Asegúrese de que todas las correas y amarres estén correctamente asegurados antes de operar el cabrestante.
- Asegúrese de que el ocupante esté sentado correctamente con las piernas y los brazos dentro de la silla de ruedas
- Asegúrese de que las piernas y la ropa no queden atrapadas por la correa.
- Si el control remoto no funciona, verifique si el LED se enciende cuando se presiona el botón, de lo

Uso sencillo:

Con el cabrestante se suministran dos mandos de radio. Uno para uso intensivo y otro para uso de emergencia. Ambos funcionan de la misma manera.

1. Para desenrollar la correa, simplemente presione y mantenga presionado el botón "OUT" en el control remoto. Asegúrese de que la silla de ruedas esté estable al moverse hacia atrás.
2. Para rebobinar la correa, presione y mantenga presionado el botón "IN" en el control remoto. Asegúrese de que la silla de ruedas esté correctamente colocada en la rampa. El cabrestante se detendrá si libera el botón. Cuando la correa haya alcanzado su posición final, el cabrestante se detendrá automáticamente.



Gestión de control remoto:

1. Agregar un control remoto:

Presione el botón de aprendizaje en la tarjeta una vez hasta que se encienda el LED. A continuación, presione uno de los botones del control remoto.

2. Vaciar la memoria

Para borrar toda la programación de la memoria de la placa del cabrestante, presione y mantenga presionado el botón de aprendizaje hasta que se ilumine el LED. Después de aproximadamente 10 segundos, suelte el botón de aprendizaje; el LED parpadeará brevemente para confirmar que se ha eliminado toda la programación.



Cambio de pilas

1. Retire los 2 tornillos para acceder a las baterías.
2. Reemplace la batería, con una batería 2CR5 para la principal o 2 baterías CR2016 para la secundaria

