


¿Por qué elegir la opción Escape Box?

- **Evacuación rápida:** El Escape Box opcional permite una evacuación rápida en caso de emergencia, sin necesidad de desbloquear las 7 hebillas del arnés.
- **Accesibilidad optimizada:** Es fácilmente accesible desde la parte delantera, en la parte superior del asiento, lo que facilita su uso en caso de emergencia.
- **Fácil acceso:** Recomendamos utilizar el Escape Box cuando el acceso al sistema estándar de evacuación de emergencia sea difícil. El acceso al sistema estándar se realiza por la parte trasera del asiento o por el maletero, lo que puede resultar restrictivo en determinadas situaciones.
- **Viaje seguro:** Con la opción Escape Box, puede viajar con total tranquilidad, con una solución de evacuación rápida y segura a su alcance.



instrucciones de uso

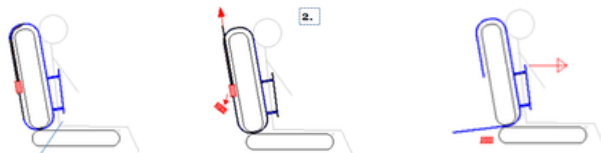

- 1/ Instale la caja en la parte superior, detrás del asiento, fijándole las dos correas del arnés.
- 2/ Dé un tirón rápido de la correa roja y la caja se separará del arnés.
- 3/ El arnés se separa de la base y la persona puede salir con el arnés.

Legislación y seguridad

- ¡El arnés de sujeción no sustituye al cinturón de seguridad! Debe utilizar siempre el cinturón de seguridad cuando utilice el arnés de seguridad, con o sin la Escape Box.
- El cortador de cinturón suministrado con el arnés debe permanecer en el vehículo al alcance de la mano en caso de emergencia.
- Se recomienda encarecidamente el uso del Escape Box en caso de emergencia.
- El uso del arnés es responsabilidad del usuario. Hasta la fecha, ninguna legislación francesa o directiva europea aborda específicamente los riesgos asociados al transporte de personas con problemas de comportamiento.

La Escape Box sustituye al sistema de evacuación de emergencia estándar para una liberación y un acceso más rápidos.


Système standard



Escape Box



Instrucciones de instalación

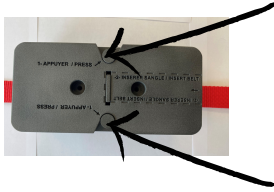

1. Introduzca la correa roja en la caja pulsando los 2 botones grises indicados con flechas en la imagen.



2 Retire el sistema estándar del arnés pulsando los 2 botones rojos.



3. Vuelva a colocar este sistema con la caja de escape y abroche firmemente las dos hebillas.



4. Pase la correa roja por el orificio de la parte superior del arnés.

EN CASO DE EMERGENCIA !



Da un tirón rápido de la correa roja. El arnés se separa de la base y la persona puede salir con el arnés.



ACCESS ABILITY

Dirección : 10 bis rue du 11 novembre

80270 Airaines, Francia

tel: +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu; www.access-ability.eu



UDI Identificación Unica del Dispositivo



Fecha limite de utilización

MD Dispositivo Médico



Certificación Europea

LOT Número de Lote del fabricante

REF Referencia Catálogo



Fabricante