

ESCAPE BOX


Sistema de evacuación de emergencia para arnés de postura

¿Por qué escoger la opción Escape Box?

- La caja opcional Escape Box proporciona una evacuación rápida en caso de accidente, sin necesidad de desbloquear los 7 bucles.
- Es fácilmente accesible desde la parte delantera, en la parte superior del asiento.
- Recomendamos el Escape Box si el acceso al sistema estándar de evacuación de emergencia es difícil. El acceso al sistema estándar se hace por el respaldo del asiento o por el baúl.
- Para viajar con espíritu libre y con total seguridad.



Instrucciones de uso

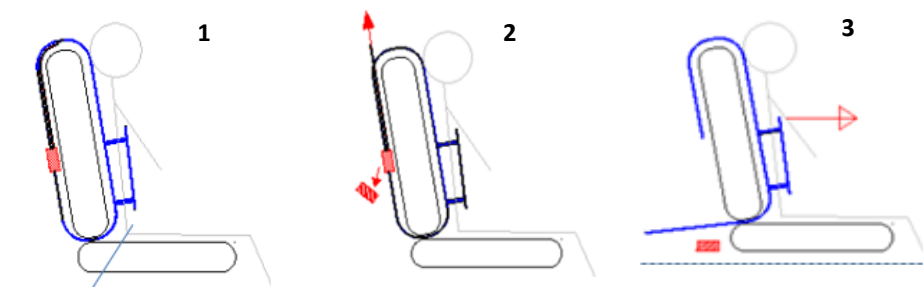

1. Caja instalada detrás del asiento
2. Tire bruscamente de la correa roja
3. El arnés se separa de la base y la persona puede salir con el arnés

Legislación y seguridad

- ¡El arnés de postura no sustituye al cinturón de seguridad!
- El uso del cinturón de seguridad sigue siendo obligatorio cuando se utiliza el arnés de postura, con o sin Escape Box.
- Instale el cortador de cinturón de seguridad de emergencia (incluido) en su vehículo.
- El uso del arnés de postura implica su propia responsabilidad. No hay ningún texto de Directiva francesa o europea que trata sobre el peligro causado en el transporte por personas.

ACCESS ABILITY

Dirección : 6 Rue du Bout de la Ville,

80490 Hocquincourt, Francia

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu; www.access-ability.eu




Escape Box



Instrucciones de uso Escape Box

Escape Box reemplaza el sistema de emergencia estándar para un acceso más rápido

Arnés estándar

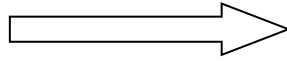


Escape Box



Pasos de instalación Escape Box

1. Retire el sistema estándar presionando los 2 botones rojos.
2. Reemplace este sistema con la caja Escape Box y sujete las hebillas de forma segura.
3. Pase la correa roja a través del orificio provisto en la parte superior del arnés.

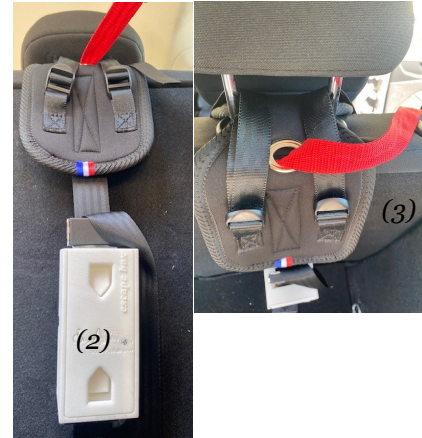

EN CASO DE URGENCIA

¡Tire con fuerza de la correa roja!

El arnés se separa de la base y la persona puede salir con el arnés.

ACCESS ABILITY

Dirección : 6 Rue du Bout de la Ville,

80490 Hocquincourt, Francia

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu; www.access-ability.eu

