

SafeWinch

Sistema 2 en 1
Simplifica tu vida!

Un nuevo sistema revolucionario que mejorará la vida de los usuarios de sillas de ruedas y sus acompañantes.

SafeWinch es un sistema combinado de cabrestante y sujeción frontal para sillas de ruedas, compuesto por dos unidades compactas, sincronizadas y autoblocantes. Permite transferir y asegurar fácilmente una silla de ruedas en un vehículo mediante un sencillo control remoto.



CREADO Y PATENTADO por



FÁCIL DE USAR - COMPACTO - SIN ESFUERZO - BLOQUEO AUTOMÁTICO

Dos cabrestantes independientes, sincronizados automáticamente por una unidad de control central.

El asistente simplemente tiene que sujetar las correas a la silla de ruedas y pulsar el botón IN del mando a distancia para elevarla y el botón OUT para bajarla.

SafeWinch se utiliza como dispositivo de sujeción frontal para sillas de ruedas y, por lo tanto, ha sido probado de acuerdo con la norma ISO 10542.



10 Bis rue du 11 novembre - 80270 Airaines - FRANCE - contact@access-ability.eu - +33 (0)3 22 25 58 65

www.access-ability.eu



SafeWinch

Sistema 2 en 1
Simplifica tu vida!

Contenido del kit:

- 2 unidades motorizadas
- 1 unidad central de procesamiento
- 1 panel de control
- mazos de cables eléctricos
- 1 mando a distancia grande
- 1 mando a distancia pequeño



Subir una sillas de ruedas:

1. Coloque la silla de ruedas al pie de la rampa.
2. Pulse OUT para extender las correas y sujetarlas a la silla de ruedas.
3. Pulse IN para iniciar el ascenso, guiando el movimiento de la silla de ruedas.
4. El sistema se detendrá cuando la silla de ruedas esté casi en su posición final.
5. Sujete manualmente el anclaje trasero.
6. Pulse IN de nuevo para tensar automáticamente las correas.
7. Compruebe que el LED parpadea dos veces consecutivas.
8. Abróchese el cinturón de seguridad del ocupante.
9. Cierre la puerta trasera: el SafeWinch se bloqueará automáticamente.



Bajar una silla de ruedas:

10. Presione OUT durante unos segundos para aflojar ligeramente las correas.
11. Retire los ganchos traseros de la silla de ruedas.
12. Continúe el descenso manteniendo la mano extendida y guiando la silla de ruedas.

Emparejamiento del nuevo mando a distancia:

- Abra el panel de acceso de la unidad de control.
- Pulse el botón de programación situado debajo del panel.
- Pulse un botón del mando a distancia que desee emparejar.
- El mando a distancia ya está registrado y listo para usar.

Correas de sujeción traseras opcionales



10 Bis rue du 11 novembre - 80270 Airaines - FRANCE - contact@access-ability.eu - +33 (0)3 22 25 58 65

www.access-ability.eu

