



Le harnais de maintien Access-Ability garantit le transport en toute sécurité des passagers avec un trouble de comportement en voiture. Il est utilisé pour :

- **Maintenir en position assise** les personnes handicapées ou avec un trouble du comportement comme les enfants ou adultes autistes.
- **Assurer le maintien postural** des personnes handicapées physiques sur le siège d'origine du véhicule.
- **Cet accessoire ne remplace et n'entrave pas l'utilisation de la ceinture de sécurité.**

Avec une utilisation journalière la durée de vie est estimée à 10 ans



Caractéristiques

- **Design ergonomique** avec dossier réglable en hauteur en fonction de la taille de la personne.
- **Fabriqué en France en tissu néoprène résistant et confortable**
- **Evolutif et durable** : plusieurs niveaux de réglage des sangles
- **Universel** : facile à installer, il s'adapte à tout type de siège ou réhausseur
- **Remboursement** par la **MDPH** possible sous "Aides Technique"
- **Essai gratuit** en France et en Belgique
- **Léger** : facile à prendre en voyage.
- **Sécuritaire** : 7 Boucles verrouillable à clé.

EN CAS D'URGENCE !

- **Boîtier d'évacuation rapide *Escape Box* en option et conseillé en cas d'urgence**



- **Système d'évacuation rapide en cas d'urgence standard**



Options du Produit

- **Boîtier d'évacuation rapide en cas d'urgence -- *Escape Box***



- **Set de 2 sangles supplémentaires** pour des sièges individuels



- **Repose-tête réglable en hauteur** pour un maintien latéral en avant

Indications et contre-indications à respecter

- **L'utilisation de la ceinture de sécurité reste obligatoire lors de l'utilisation du harnais. Ce dernier ne remplace pas la ceinture de sécurité et n'entrave pas son utilisation.**
- Si l'utilisateur mesure moins de 1m10, il est déconseillé d'utiliser le harnais de maintien Access-Ability sans réhausseur. Auquel cas, elle s'expose à une gêne au niveau du cou. **Le dispositif sera donc moins performant.**
- Il n'est donc pas conseillé d'utiliser le harnais de maintien Access-Ability autre que la manière indiquée dans la notice d'utilisation.
- Aussi, il est **déconseillé de laver** le harnais de maintien à la machine à laver au risque de le **déformer** et d'**accélérer son usure**. Si un nettoyage est nécessaire, le faire à l'aide d'une éponge humide et/ou d'un chiffon sec.
- Il est également **déconseillé d'utiliser** le harnais en ayant un **contact direct avec la peau** (utilisation torse nu).
- Il est essentiel de vérifier régulièrement l'état et la conformité du harnais de maintien afin d'éviter tout incident. Toute négligence à cet égard pourrait entraîner des risques et la responsabilité de son bon fonctionnement incombe à l'utilisateur.
- **Le marteau coupe-ceinture livré avec le harnais doit rester dans le véhicule facilement accessible en cas d'urgence.**
- Il est conseillé que l'utilisateur soit accompagné tout au long du trajet.

NOTICE D'INSTALLATION

Base support siège



Dossier réglable




Plastron ou Gilet frontal



INSTALLATION SUR SIÈGE BANQUETTE

1. Détacher le **plastron de la base support et du dossier** (A,B,C)
2. Glisser le **dossier réglable (B)** sur la base support (A). **Placer l'ensemble (A+B)** sur le dossier du siège de la voiture. Si nécessaire, plier le siège vers l'avant pour passer les sangles et les accrocher.
3. **Serrer au maximum les sangles autour du dossier du siège.**
4. Le haut de la **base support** peut passer en dessous ou au-dessus de l'appui-tête selon la taille de la personne.
5. Une fois la personne installée, clipser le **plastron (C)** à l'**ensemble base (A+B)** et ajuster la longueur des 7 sangles, puis **ajuster la ceinture de sécurité du véhicule**
6. Retourner les bouts des sangles pour éviter qu'elles glissent.

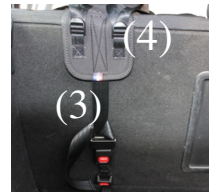

INSTALLATION SUR SIÈGE INDIVIDUEL

Les étapes principales de l'installation restent les mêmes que pour un siège standard.

2 sangles supplémentaires sont désormais nécessaires et disponibles en option




Une sangle supplémentaire à accrocher derrière pour rallonger et arriver à faire le contour du siège.



Une deuxième sangle est à accrocher au bas du dossier du siège.

EVACUATION FACILE EN CAS D'URGENCE EN 1,2 ET 3

1. Personne attachée avec le harnais
2. Le harnais se détache en appuyant sur les 2 boutons rouges derrière le siège
3. La personne peut partir avec le harnais sans avoir à déverrouiller chaque boucle en cas d'urgence

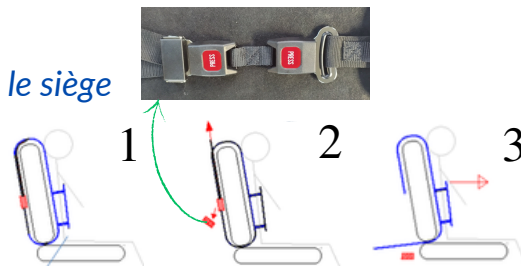

ACCESS ABILITY



Adresse : 10 bis rue du 11 novembre

80270 Airaines, France

tél: +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu; www.access-ability.eu



Date de création : 25/06/2025
Révision 2 : 25/02/2026

UDI Identifiant Unique de Dispositif

Date Limite d'Utilisation

MD Dispositif Médical

CE Marquage CE

LOT Numéro de Lot du fabricant

REF Reference Catalogue

Fabricant