



Le gilet de posture a été conçu spécifiquement pour :

- maintenir les personnes handicapées mentales en position assise et **garantir un transport en toute sécurité** pour tous les autres passagers et conducteur du véhicule.
- **assurer le maintien postural des personnes handicapées physiques** sur le siège d'origine du véhicule.

Le système est composé d'un sous-ensemble formant le support, qui **se fixe très simplement** autour du siège du véhicule, et d'un gilet à sept boucles

pour maintenir la personne dans une position ergonomique et sécuritaire.

Le système de verrouillage sur les boucles latérales permet de **sécuriser** le passager pour éviter qu'il/elle ne se détache et perturbe les autres passagers/conducteur du véhicule. Le gilet est fourni avec sept clés pour verrouiller et déverrouiller les boucles selon les besoins. Il est recommandé de verrouiller les boucles uniquement si la situation l'exige.



Le gilet de posture est fabriqué en tissu **néoprène** qui permet une assise **confortable**. De plus le tissu néoprène est un matériau très résistant, durable et lavable, il est parfaitement adapté à cette usage.

Option:

- **Appui-tête:** le gilet de posture peut être équipé d'un appui-tête fixé avec un velcro et réglable en hauteur pour obtenir un maintien latéral de la tête.
- Modifications sur mesure possibles selon le besoin du client.



Législation et sécurité :

Ce produit est uniquement destiné pour:

- les personnes handicapées mentales devant être retenue sur leur siège.
- le maintien postural sur le siège de voiture de personnes handicapées physiques.

L'utilisation de la ceinture de sécurité reste **obligatoire** lorsque vous utilisez le gilet de posture.

Nous recommandons fortement **d'installer le coupe-ceinture** d'urgence dans votre véhicule; inclus avec chaque gilet de posture.

L'utilisation du gilet de posture est toujours à vos risques et périls.



Adresse: BP19, 80490 Hallencourt, France

Tel/Fax : +33 (0)3 22 25 58 65

Mobile: + 33 (0) 6 45 72 46 90

contact@access-ability.eu

www.access-ability.eu

Attention choisir la bonne base support: Siège Standard ou Fixe?

Si vous avez de l'espace entre le dossier et l'assise vous pouvez installer le modèle pour siège standard. En d'autres termes, si vous pouvez glisser votre main entre le siège et dossier, le support standard est suffisant, voir figure 1.




Lorsque vous ne disposez pas d'un espace entre le dossier et le siège, dans ce cas choisissez un modèle «siège fixe». La base support pour siège fixe est plus longue et est fournie avec une sangle supplémentaire. Cette ceinture supplémentaire permet de plaquer la base support sur le siège, voir figure 2.

Notice d'installation et utilisation

Siège Standard



1

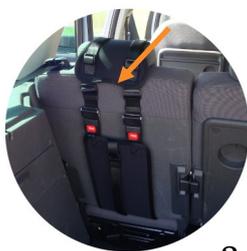

2



3

- 1 - Placer le support sur le dossier du siège de la voiture.
- 2 - Si le système de retenue est utilisé pour des enfants plus grands, le support est installé sur l'appui-tête.
- 3 - Serrer les deux sangles de fixation. Les deux boucles latérales sont sur la face arrière du dossier, voir image 2.

Attention: Pour les sièges fixes, positionner le support autour le l'assise et serrer la sangle fournie pour éviter que le support ne «flotte» sur le siège. Voir photo 4, 5, 6.

- 4 - Fixer le gilet de retenue universel au support en utilisant les sept boucles plastiques et régler la longueur des sangles aux mesures de la personne, voir photo 3
- 5 - **Toujours** utiliser la ceinture de sécurité standard pour le transport en toute sécurité et légalité, voir photo 3.
- 6 - Installer le coupe-ceinture d'urgence et les clés dans votre véhicule.
- 7 - Le gilet est garanti **un an** à condition que les recommandations d'installation et utilisation soient respectées.

Ne verrouiller les boucles que si c'est absolument nécessaire. Vérifier périodiquement le bon fonctionnement des 7 boucles.



Siège Fixe



4



5



6

Nous restons à votre disposition pour toutes informations sur le gilet de posture, avoir un devis ou organiser un essai gratuit.



Adresse: BP19, 80490 Hallencourt, France

Tel/Fax : +33 (0) 3 22 25 58 65

Mobile: + 33 (0) 6 45 72 46 90

Courriel: contact@access-ability.eu

Site: www.access-ability.eu