

## El arnés de postura / sistema de retención se utiliza para :

- Transportar en toda seguridad los niños/adultos con necesidades especiales, tales como trastorno del espectro Autista; trastorno de Asperger, personas con comportamiento difícil y/o desafiante.
- Proporcionar un apoyo postural a las personas con discapacidad física o falta de control muscular durante el transporte.

El arnés proporciona una verdadera sensación de **seguridad y comodidad** para los usuarios , conductor, así como los demás pasajeros.



## El arnés es :

- **Universal** : adaptable a todo tipo de asientos.
- **Resistente** : hecho con material neopreno, confortable.
- **Seguro** : contiene siete hebillas con cierre y sus llaves.
- **Fácil de transportar** : solo 2.3 kg (coche, minibús, viaje, renta coches ..).
- **Adaptable y durable** : Puede utilizarse con asiento elevador y contiene correas adaptables para adaptarse al niño en crecimiento.



## Opciones :

1. **Reposacabezas** : fijación con velcro que permite ajustar y dar apoyo a la cabeza en caso de personas con falta de control muscular.
2. **Modificaciones** posibles de acuerdo a necesidades específicas.



## Legislación y seguridad :

- Recomendamos que se refiera a las reglas de seguridad y legislación del país de residencia antes de utilizar el arnés.
- El cinturón de seguridad **es obligatorio** y debe de utilizarse siempre con el arnés.
- Un martillo/cortador de correas está incluido con el arnés en caso de emergencia. Este debe ser instalado en el vehículo donde se utiliza el arnés.
- Verificar periódicamente el buen funcionamiento de las hebillas.
- El conductor del vehículo debe tomar la responsabilidad sobre el buen uso y buena utilización del arnés.



**PRODUCTO  
CERTIFICADO**





# Modo de instalación



## Etapa 1 : Definir el tipo de asiento

**Asiento estándar (1):** Hay un espacio entre la base y la parte trasera del asiento. Se puede pasar la mano a través.

**Asiento banqueta (2):** No hay espacio entre la base y parte trasera del asiento. En este caso, utilizar las correas suplementarias (C1 and C2).


## Etapa 2 : Instalación

El arnés /sistema de retención contiene :

Una base (A)

Un chaleco frontal de retención (B)

Dos correas suplementarias : para asiento tipo banqueta (C1, C2)

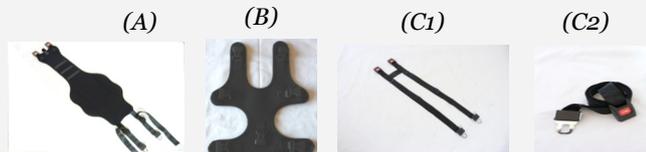


### Asiento estándar :

1. Separar la base (A) del chaleco frontal de retención (B).
2. Coloque la base (A) sobre el respaldo del asiento (a). Si es necesario, plegar el asiento hacia adelante para pasar las correas que van alrededor del asiento (b). Clip y apretar los cinturones al máximo para asegurarse que no flota.
3. La base puede ser instalada sobre o debajo del cabecero (b, c). Esto depende de la estatura de la persona.
4. Una vez que la persona esta sentada cómodamente, tomar el chaleco frontal de retención (B) y clip contra la base (A). Ajustar las 7 correas y bloquear, si necesario (d).

(a)



(b)

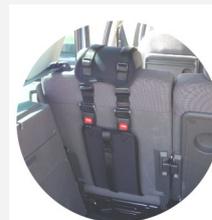

(c)



(d)

**IMPORTANTE!!** El arnés no pretende sustituir el cinturón de seguridad.

Este debe ser **siempre utilizado** en todo caso.


### Asiento banqueta (individual):

1. Separar la base (A) del chaleco frontal (B).
2. Añadir las correas suplementarias (C1) a las correas de la base (A)
3. Coloque la base (A) sobre el respaldo del asiento (a). Si es necesario, plegar el asiento hacia adelante para pasar las correas que van alrededor del asiento. Clip y apretar los cinturones al máximo para asegurarse que no flota (b).
4. Instalar la correa (C2) y clip alrededor del asiento banqueta (d, e) al nivel del pliegue del asiento banqueta.
5. Una vez que la persona esta sentada cómodamente, tomar el chaleco frontal de retención (B) y clip contra la base trasera (A).

(a)



(b)

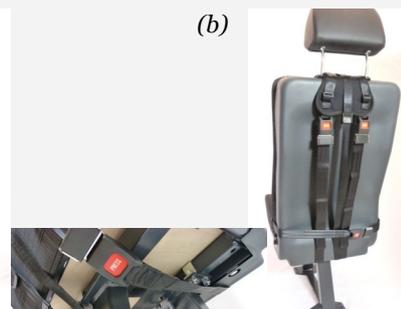

(c)



(d)



(e)

**IMPORTANTE!!** El arnés no pretende sustituir el cinturón de seguridad.

Este debe ser **siempre utilizado** en todo caso.

**Buen viaje !**

Contáctanos para mas información....



Dirección : BP19, 80490 Hallencourt, France

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65

Celular: + 33 (0) 6 45 72 46 90

[contact@access-ability.eu](mailto:contact@access-ability.eu)

[www.access-ability.eu](http://www.access-ability.eu)