

## Harnais de maintien – version adulte




Le harnais de maintien pour adulte est utilisé pour :

- **maintenir en position assise** les personnes avec un trouble du comportement, comme les adultes autistes.
- **assurer le maintien postural** des personnes handicapées physiques dans une position ergonomique sur le siège d'origine du véhicule.

Son système de verrouillage permet de **garantir un transport en sécurité** pour les passagers et pour le conducteur du véhicule.

### Caractéristiques:

- **Nouveau design ergonomique**, dossier réglable en hauteur
- Recommandé pour les personnes **à partir de 1m75** et/ou avec un **comportement agressif**
- **Nouveau système d'évacuation rapide** en cas d'urgence, accessible par l'arrière du siège ou par le coffre
- **Fabriqué en France**, en **tissu néoprène** résistant et confortable
- **Evolutif et durable** : plusieurs niveaux de réglage des sangles
- **Sécuritaire: sept boucles** avec **blocage**. Le déverrouillage se fait avec le stylo fourni ou avec les clés de voiture en appuyant au milieu de la boucle.
- **Universel**: facile à installer, il s'adapte à tout type de siège ou rehausseur
- **Essai gratuit** en France et Belgique
- **Remboursement** possible par la **MDPH** : Maison Départementale des Personnes Hand

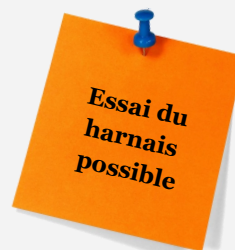

### Options

- Set de **2 sangles supplémentaires** pour des sièges individuels
- **Nouveau boîtier évacuation rapide** en cas d'urgence **Escape Box**
- Autres modifications sur mesure sont possibles sur devis



Adresse : 6 Rue du Bout de la Ville  
80490 Hocquincourt, France  
Tel : +33 (0)3 22 25 58 65  
Mobile : + 33 (0) 6 45 72 46 90  
[contact@access-ability.eu](mailto:contact@access-ability.eu)  
[www.access-ability.eu](http://www.access-ability.eu)

# Notice d'installation harnais de maintien

## Base support siège

(A)



## Dossier réglable

(B)



## Plastron ou gilet frontal

(C)





**Important:** Le système standard d'évacuation d'urgence est accessible par l'arrière du siège ou par le coffre. Il suffit d'appuyer sur les 2 boutons rouges pour que le harnais se sépare de la base et la personne peut partir avec le harnais.



## Installation sur siège banquette

1. Détacher le **plastron (C)** de la **base support** et du **dossier (A, B)**.
2. Glisser le **dossier réglable (B)** sur la **base support (A)**. Placer l'ensemble (A+B) sur le dossier du siège de la voiture. Si nécessaire, plier le siège vers l'avant pour passer les sangles et les accrocher.
3. **Serrer** au maximum les sangles autour du dossier du siège .
4. Le haut de la **base support** peut passer en dessous ou au dessus de l'appui tête selon la taille de la personne.
5. Une fois la personne installée, clipser le **plastron (C)** à l'**ensemble base (A+B)** et ajuster la longueur des 7 sangles.
6. Retourner les bouts des sangles pour éviter qu'elles glissent.

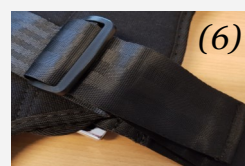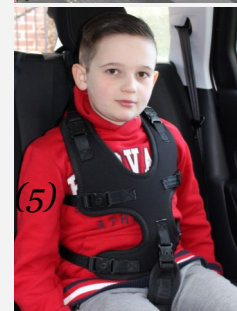

## Installation sur siège individuel

Les étapes principales de l'installation restent les mêmes que pour un siège banquette. **2 sangles supplémentaires** sont désormais nécessaires et disponibles **en option**:

1. Une sangle supplémentaire à accrocher derrière pour rallonger et arriver à faire le contour du siège.
2. Une 2ième sangle est à accrocher au bas du dossier du siège. Bien serrer!



**Important:** L'utilisation de la **ceinture de sécurité** reste **obligatoire** lorsque vous utilisez le harnais de maintien. **Installez le coupe-ceinture** d'urgence (inclus) dans votre véhicule. L'utilisation du harnais de maintien **engage votre propre responsabilité.**

\*Certaines photos d'installation montrent le harnais universel mais le principe reste le même