

Access-Ability

- fournisseur d'accessibilité -

Harnais de maintien génération 2

Le **nouveau harnais de maintien de Access Ability** garantit le transport en toute sécurité des passagers avec un trouble de comportement en voiture. Il sert à:

- **maintenir en position assise** les personnes handicapées ou avec un trouble du comportement comme les enfants ou les adultes autistes.
- **assurer le maintien postural** des personnes handicapées physiques sur le siège d'origine du véhicule.



Caractéristiques

- **Design ergonomique** avec dossier réglable en hauteur en fonction de la taille de la personne
- **Système évacuation rapide** en cas d'urgence **en standard***
- **Boitier d'évacuation rapide** en cas d'urgence **en option**
- **Fabriqué en France**, en **tissu néoprène** résistant et confortable
- **Evolutif et durable** : plusieurs niveaux de réglage des sangles
- **Universel**: facile à installer, il s'adapte à tout type de siège ou rehausseur
- **Sécuritaire**: **sept boucles verrouillables** à clé
- **Léger** : facile à prendre en voyage
- **Essai gratuit** en France et Belgique
- **Remboursement** par la **MDPH** possible sous « Aides Techniques »
- Une **version adulte** est disponible pour les personnes de forte corpulence ou de plus de 1m75



Options

- **Repose-tête** réglable en hauteur pour un maintien latéral et avant
- Set de **2 sangles supplémentaires** pour des sièges individuels**
- Autres modifications sur mesure sont possibles sur devis



Législation et sécurité

- L'utilisation de la **ceinture de sécurité** reste **obligatoire** lorsque vous utilisez le harnais de maintien. **Le harnais de maintien ne remplace pas la ceinture de sécurité!**
- **Installez le coupe-ceinture** d'urgence (inclus) dans votre véhicule.
- L'utilisation du harnais de maintien **engage votre propre responsabilité**. Il n'y a aucun texte français ou directive européenne traitant du danger provoqué dans les transports par les personnes souffrantes du trouble du comportement.



Harnais de maintien




FAIT EN FRANCE


Base support siège



Dossier réglable

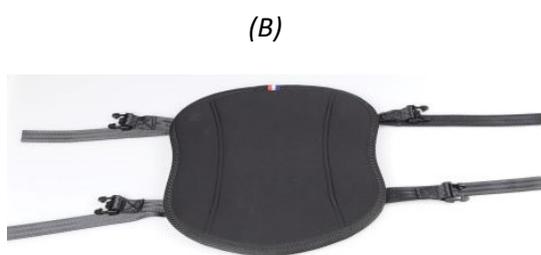

Plastron ou gilet frontal

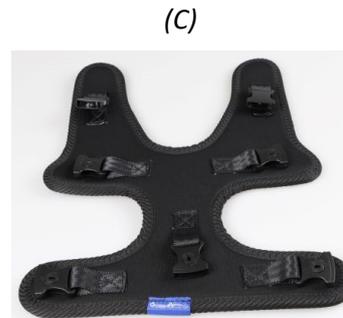

Installation sur siège standard

1. Détacher le **plastron de la base support et du dossier** (A, B, C).
2. Glisser le **dossier réglable** (B) sur la **base support** (A). Placer l'ensemble (A+B) sur le dossier du siège de la voiture. Si nécessaire, plier le siège vers l'avant pour passer les sangles et les accrocher.
3. **Serrer** au maximum les sangles autour du dossier du siège .
4. Le haut de la **base support** peut passer en dessous ou au dessus de l'appui tête selon la taille de la personne.
5. Une fois la personne installée, clipser le **plastron** (C) à l'**ensemble base** (A+B) et ajuster la longueur des 7 sangles.
6. Retourner les bouts des sangles pour éviter qu'elles glissent.



**Installation sur siège individuel


Les étapes principales de l'installation restent les mêmes que pour un siège standard. **2 sangles supplémentaires** sont désormais nécessaires et disponibles **en option**:

1. Une sangle supplémentaire à accrocher derrière pour rallonger et arriver à faire le contour du siège.
2. Une 2ième sangle est à accrocher au bas du dossier du siège.



*Evacuation facile en cas d'urgence en 1,2 et 3

1. Personne attachée avec le harnais
2. Le harnais se détache en appuyant sur les 2 boutons à l'arrière du siège
3. La personne peut partir avec le harnais en cas d'urgence

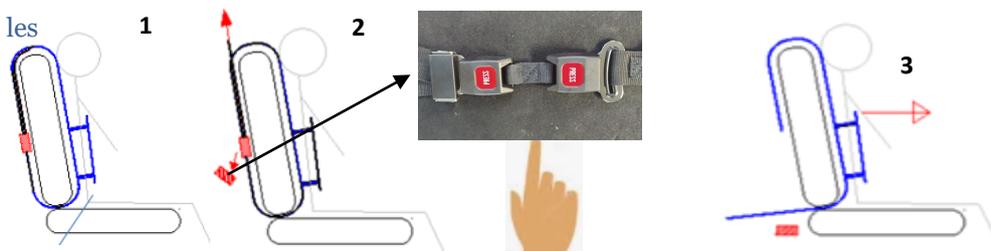

ACCESS ABILITY

Adresse : 10 Bis Rue du 11 novembre

80270 Airaines, France

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu; www.access-ability.eu