

# ESCAPE BOX

## Systeme évacuation d'urgence harnais de maintien

### Pourquoi choisir l'option Escape Box?

- Le boîtier optionnel **Escape Box** assure une évacuation rapide en cas d'accident sans avoir besoin de déverrouiller les 7 boucles.
- Il est facilement accessible par l'avant, en haut du siège.
- Nous recommandons l'**Escape Box** si l'accès au système standard d'évacuation d'urgence est difficile. L'accès au système standard se fait par l'arrière du siège ou par le coffre.
- Pour voyager l'esprit libre et en toute sécurité.



FAIT EN  
FRANCE

### Utilisation



1. Boîtier installé derrière le siège
2. Tirer d'un coup sec sur la sangle rouge
3. Le harnais se sépare de la base et la personne peut partir avec le harnais

### Législation et sécurité

- **Le harnais de maintien ne remplace pas la ceinture de sécurité!** L'utilisation de la **ceinture de sécurité reste obligatoire** lorsque vous utilisez le harnais de maintien, avec ou sans Escape Box.
- **Installez le coupe-ceinture** d'urgence fourni, dans votre véhicule.
- L'utilisation du harnais de maintien **engage votre propre responsabilité**. Il n'y a aucun texte français ou directive européenne traitant du danger provoqué dans les transports par les personnes souffrantes du trouble du comportement.

Escape Box

#### ACCESS-ABILITY

Adresse : 10 Bis rue du 11 novembre,  
80270 Airaines, France  
Tel : +33 (0)3 22 25 58 65  
[contact@access-ability.eu](mailto:contact@access-ability.eu)




[www.access-ability.eu](http://www.access-ability.eu)



# Notice d'installation Escape Box

Escape Box remplace le système d'évacuation standard en cas d'urgence pour un accès plus rapide

Système standard



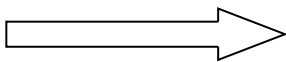


Escape Box



## Etapas d'installation Escape Box

1. Insérer la sangle rouge dans le boîtier en appuyant sur les 2 boutons gris indiqués par des flèches dans l'image.
2. Retirer le système standard en appuyant sur les 2 boutons rouges.
3. Remplacer ce système par le boîtier Escape Box et bien clipser les deux boucles.
4. Passer la sangle rouge dans l'orifice prévu en haut du harnais.

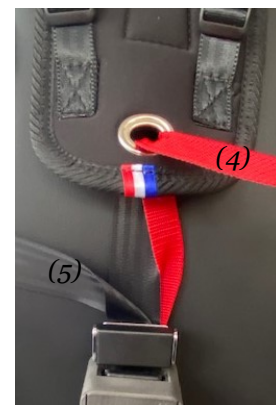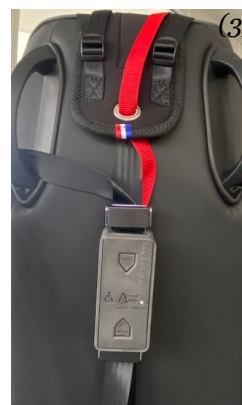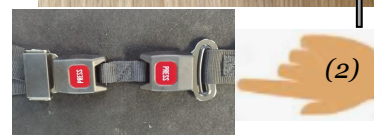

### EN CAS D'URGENCE

**Tirer d'un coup sec sur la sangle rouge!**

**Le harnais se sépare de la base et la personne peut partir avec le harnais.**



## ACCESS-ABILITY

Adresse : 10 Bis rue du 11 novembre,

80270 Airaines, France

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu [www.access-ability.eu](http://www.access-ability.eu)



[Vidéo d'installation ici](#)

