

Treuil Access Winch - Portable **Nouveau modèle**

Le treuil Access Winch - Portable est idéal pour des transporteurs car il est facilement transférable d'un véhicule à un autre. Le treuil a une **batterie intégrée** destinée à aider à la montée et à la descente des passagers en fauteuil roulant dans des véhicules PMR.



Innovations:

- **Arrêt de fin course** pour sangle complètement rentrée
- **Arrêt de fin course** pour sangle entièrement sortie: ça évite que la sangle s'enroule du mauvais sens si l'utilisateur continue à appuyer sur le bouton « OUT »
- **Composants métalliques zingués** avec un traitement de surface
- **Télécommande** avec une longue durée d'autonomie très **facile à annexer et programmer**
- Démarrage et arrêt en douceur
- **Electronique améliorée** et vitesse réglable à la fabrication
- **Moteur plus puissant** et très **silencieux**
- Sangles et boucles de meilleure qualité



Caractéristiques standard:

- **Puissant:** capacité de chargement de **250 kg** (rampe 20%)
- Dimensions: L25 x l16 x H21cm
- **Garantie 2 ans** à condition que les précautions d'emploi dans la notice d'installation soit respectées
- Inclus dans la valise du treuil: un treuil avec batterie intégrée, une sangle de 5,5 m, une sangle en Y, une batterie de secours, un chargeur et deux télécommandes



Précautions d'emploi:

- **Ne pas utiliser le treuil** lorsque le véhicule est en mouvement
- Le treuil **ne remplace pas** le système de retenue (arrimage) du fauteuil roulant
- Vérifier que la sangle est **propre, sans signes d'usure** et **est libre** de tout obstacle
- L'accompagnateur doit **guider et pousser légèrement** le fauteuil pendant la montée et descente



accès véhicule • transfert Fauteuil • adaptation conduite • transport pmr • harnais maintien • transfert pmr

10 Bis rue du 11 novembre • 80270 Airaines • HAUTS DE FRANCE • France
 contact@access-ability.eu • 03 22 25 58 65

www.access-ability.eu

Installation:

L'installation est simple avec le sabot fourni pour glisser dans un rail.



Conditions d'utilisation du treuil et des batteries:

- Assurez-vous que toutes les sangles et les attaches soient correctement fixées avant de faire fonctionner le treuil
- Assurez-vous que l'occupant est **correctement assis** avec les jambes et les bras à l'intérieur du fauteuil roulant. Assurez-vous que les jambes et les vêtements ne seront pas coincés par la sangle
- N'oubliez pas **d'allumer** et **d'éteindre le treuil** en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt
- Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez si la LED s'allume quand on appui sur le bouton, sinon vérifiez / changez les piles
- Si le treuil ne répond pas, vérifiez / remplacez le fusible
- **Avant la première utilisation**, assurez-vous que les batteries sont chargées à 100%. Il est préférable de **charger les batteries avant de les réutiliser seulement** avec le **chargeur recommandé**. Pour les charger, il suffit de les fixer dans le chargeur et atteindre le chargement complet. Le **voyant rouge** indique que la batterie doit être chargée, le **voyant vert** indique le chargement complet de la batterie.
- Pour le stockage, un niveau de charge compris entre 55 et 75 % est idéal.
- Les **batteries préfèrent la fraîcheur**. À des températures ambiantes situées autour des 20 degrés, une **batterie perd environ 3 %** de sa charge par mois.
- Il faut toujours **vérifier que la décharge ne descende pas en dessous des 10 %** d'énergie parce qu'une décharge trop importante dégrade les composants chimiques de la batterie de manière définitive.
- Afin de préserver votre batterie, il est conseillé de réaliser **une fois par mois un cycle complet charge/décharge**. Déchargez-la jusqu'au seuil limite de 10 % puis rechargez-la complètement sans interruption.
- Evitez le contact avec des objets métalliques. Evitez l'impact fort qui peut provoquer un écoulement du liquide qui peut causer des irritations des brûlures. N'ouvrez pas la batterie qui peut provoquer un court circuit.

Utilisation simple:

Deux radiocommandes sont fournies avec le treuil. Une pour utilisation intensive et une de secours. Les deux fonctionnent de la même manière.

1. Pour dérouler la sangle il vous suffit de maintenir appuyé sur le bouton « OUT » de la télécommande. Assurez-vous de la stabilité du fauteuil roulant lorsque celui-ci recule.
2. Pour remonter la sangle, maintenez appuyé sur le bouton « IN » de la télécommande. Assurez-vous que le fauteuil roulant soit correctement positionné sur la rampe. Le treuil s'arrêtera si le bouton est relâché. Lorsque la sangle a atteint sa position finale, le treuil s'arrêtera automatiquement.



Gestion de télécommandes:

Ajout d'une télécommande :

Appuyez 1 fois sur le bouton d'apprentissage de la carte jusqu'à la LED s'allume. Ensuite, appuyez sur un des boutons de la télécommande.



Vider la mémoire

Pour supprimer toute programmation de la mémoire de la carte du treuil, appuyez sur le bouton d'apprentissage et maintenez-le enfoncé jusqu'à la LED s'allume. Après environ 10 secondes, relâchez le bouton d'apprentissage, la LED clignote brièvement pour confirmer que toute la programmation a été supprimée.

Changement de piles:

1. Devisez les 2 vis pour accéder aux piles (pour la télécommande principale)
2. Remplacez la pile, avec une pile 2CR5 pour la principale ou 2 piles CR2016 pour la secondaire.

