



Le **Nouveau harnais de maintien Access-Ability** garantit le transport en toute sécurité des passagers avec un trouble de comportement en voiture. Il est utilisé pour :

- **Maintenir en position assise** les personnes handicapées ou avec un trouble du comportement comme les enfants ou adultes autistes.
- **Assurer le maintien postural** des personnes handicapées physiques sur le siège d'origine du véhicule.
- **Cet accessoire ne remplace et n'entrave pas l'utilisation de la ceinture de sécurité.**

Avec une utilisation journalière la durée de vie est estimée à 10 ans



Caractéristiques

- **Design ergonomique** avec dossier réglable en hauteur en fonction de la taille de la personne.
- **Fabrique en France en tissu néoprène résistant et confortable**
- **Evolutif et durable** : plusieurs niveaux de réglage des sangles
- **Universel** : facile à installer, il s'adapte à tout type de siège ou réhausseur

- **Remboursement** par la **MDPH** possible sous "Aides Technique"
- **Essai gratuit** en France et en Belgique

- **Léger** : facile à prendre en voyage.
- **Sécuritaire** : 7 Boucles verrouillable à clé.

EN CAS D'URGENCE !

- **Boîtier d'évacuation rapide *Escape Box* en option et conseillé en cas d'urgence**



- **Système d'évacuation rapide en cas d'urgence standard**



Options du Produit

- **Boîtier d'évacuation rapide en cas d'urgence -- *Escape Box***



- **Set de 2 sangles supplémentaires** pour des sièges individuels



- **Repose-tête réglable en hauteur** pour un maintien latéral en avant

Indications et contre-indications à respecter

- **L'utilisation de la ceinture de sécurité reste obligatoire lors de l'utilisation du harnais. Ce dernier ne remplace pas la ceinture de sécurité et n'entrave pas son utilisation.**
- Si l'utilisateur mesure moins de 1m10, il est déconseillé d'utiliser le harnais de maintien Access-Ability sans réhausseur. Auquel cas, elle s'expose à une gêne au niveau du cou. **Le dispositif sera donc moins performant.**
- Il n'est donc pas conseillé d'utiliser le harnais de maintien Access-Ability autre que la manière indiquée dans la notice d'utilisation.
- Aussi, il est **déconseillé de laver** le harnais de maintien à la machine à laver au risque de le **déformer** et d'**accélérer** son usure. Si un nettoyage est nécessaire, le faire à l'aide d'une éponge humide et/ou d'un chiffon sec.
- Il est également **déconseillé** d'utiliser le harnais en ayant un **contact direct avec la peau** (utilisation torse nu).
- Il est essentiel de vérifier régulièrement l'état et la conformité de ce harnais de maintien en voiture afin d'éviter tout incident. Toute négligence à cet égard pourrait entraîner des risques et la responsabilité de son bon fonctionnement incombe à l'utilisateur.
- **Le marteau coupe-ceinture livré avec le harnais doit rester dans le véhicule facilement accessible en cas d'urgence.**
- Il est conseillé que l'utilisateur soit accompagné tout au long du trajet.

NOTICE D'INSTALLATION

Base support siège



Dossier réglable




Plastron ou Gilet frontal



INSTALLATION SUR SIÈGE BANQUETTE

1. Détacher le **plastron de la base support et du dossier** (A,B,C)
2. Glisser le **dossier réglable (B)** sur la base support (A). Placer l'ensemble (A+B) sur le dossier du siège de la voiture. Si nécessaire, plier le siège vers l'avant pour passer les sangles et les accrocher.
3. Serrer au maximum les sangles autour du dossier du siège.
4. Le haut de la **base support** peut passer en dessous ou au-dessus de l'appui-tête selon la taille de la personne.
5. Une fois la personne installée, clipser le **plastron (C)** à l'ensemble **base (A+B)** et ajuster la longueur des 7 sangles, puis **ajuster la ceinture de sécurité du véhicule**
6. Retourner les bouts des sangles pour éviter qu'elles glissent.

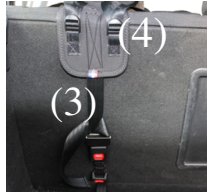

INSTALLATION SUR SIÈGE INDIVIDUEL

Les étapes principales de l'installation restent les mêmes que pour un siège standard.

2 sangles supplémentaires sont désormais nécessaires et disponibles en option




Une sangle supplémentaire à accrocher derrière pour rallonger et arriver à faire le contour du siège.



Une deuxième sangle est à accrocher au bas du dossier du siège.

EVACUATION FACILE EN CAS D'URGENCE EN 1,2 ET 3

1. Personne attachée avec le harnais
2. Le harnais se détache en appuyant sur les 2 boutons arrière du siège
3. La personne peut partir avec le harnais sur lui sans avoir à déverrouiller chaque boucle en cas d'urgence

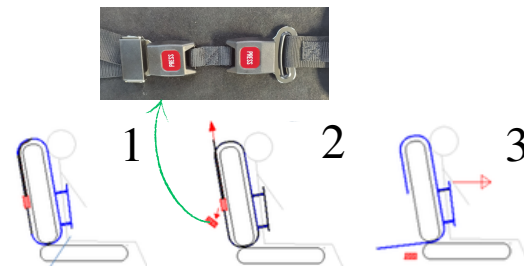

ACCESS ABILITY



Adresse : 10 bis rue du 11 novembre

80270 Airaines, France

tél: +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu; www.access-ability.eu



UDI Identifiant Unique de Dispositif



Date Limite d'Utilisation

MD Dispositif Médical



Marquage CE

LOT Numéro de Lot du fabricant

REF Reference Catalogue



Fabricant